

	<b>SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD ISO-15189</b>	
	<b>MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PREANALITICOS</b>	<b>Código:MA-LGA-002 v.1 Fecha: 17/09/2016 Páginas: 16/8</b>

**N°16**



*Comprometidos con su Salud*

**Examen: Cultivo de Abscesos y otras Secreciones de Piel.**

Instrucciones para la toma de muestra:

1. No aplicar ningún tipo de tratamiento local al menos 2 días antes de la toma.
2. Suspender la ingesta de antibióticos al menos 3 días antes de la toma de muestra.
3. No limpiar el área afecta el día de la toma de muestra.