

	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD ISO-15189	
	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PREANALITICOS	Código: MA-LGA-002 v.1 Fecha: 17/09/2016 Páginas: 5/8

Nº5



Comprometidos con su Salud

**Examen: Examen General de Orina (EGO) y/o
Urocultivo.**

Instrucciones para la toma de muestra:

1. Debido a la posibilidad de contaminación de la orina con bacterias y células de la piel del entorno (Principalmente en las mujeres) se recomienda que haya una limpieza previa de los genitales.
2. En caso de las mujeres es necesario separar los labios de la vagina; en el caso de los hombres deben retraer el prepucio y limpiar la punta del pene.
3. La muestra ideal es la primera de la mañana.
4. Al empezar a orinar, deje caer la orina inicial en el inodoro, a continuación recoger orina de media micción en un recipiente estéril y descartar el resto de la orina (se sigue orinando directamente en el inodoro).
5. En caso de los recién nacidos o niños menores de 2 años, se utilizan bolsas recolectoras pediátricas, siguiendo las mismas indicaciones. Si al cabo de 45 minutos el bebé no ha orinado se debe cambiar la bolsa por otra nueva.
6. Una vez tomada la muestra se debe cerrar herméticamente y transportarla al laboratorio. Si la muestra no va a ser llevada inmediatamente, debe mantenerse refrigerada hasta un máximo de 2 horas.
7. No se debe recoger muestras de orina durante el periodo menstrual